


## İÇİNDEKİLER



Kullanıcı talimatı

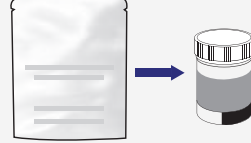

İlaç Test Kabı



Güvenlik Şeridi

## TESTTEN ÖNCE




Saat bulundurun




## 01 Test Prosedürü




- 1 Test kabını mühürlü test poşetinden çıkarınız. Kap aşağısındaki alana tarih ve İsim soy adı baş harfleriyle belirtiniz.

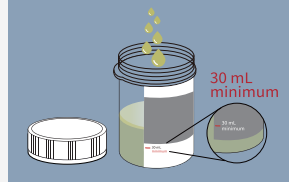

- 2 Kapağı açınız ve belirtilen kırmızı çizgiye kadar en az 30 ml idrar biriktiriniz.

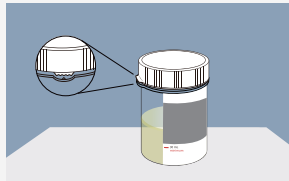


- 3 Kapağın çıkıntılı alanı üstte kalacak şekilde sıkıca kapatınız.

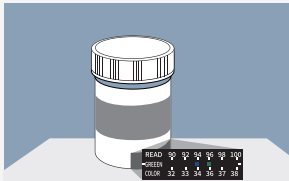


- 4 Sıcaklığın uygunluğunu kontrol ediniz.




- 5 Test alanını örten etiketi delikli noktadan itibaren pencere şeklinde görünecek şekilde açınız.

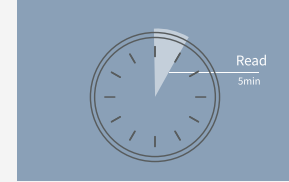

- 6 5 dk. Sonra test sonucunu okuyunuz. 10 dk. dan sonra test sonucunu yorumlamayınız.

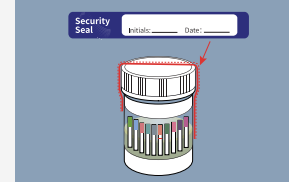


- 7 Eğer ön bir pozitif sonuç varsa test yapıcı, test yapılının güvenlik mühür etiketini ad ve soyadı tarih ile beraber görünecek şekilde kapağın üzerine yapıştırır.

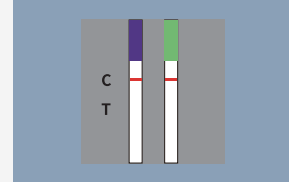


- 8 Tüm ön pozitif sonuçlar, alternatif bir ölçüm metodu ile doğrulanmalıdır. (Ör: GC/MS veya LC/MS).

## 02 Sonuçların Yorumlanması

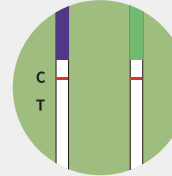


### Ön Pozitif Sonuçlar

Kontrol bölümünde çizgisel renk görülmesi ancak (T) Test bölümünde çizgisel bir renk olmaması durumunda Test Pozitifdir.

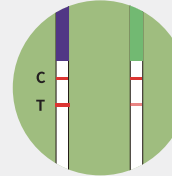

### Negatif Sonuç

(C) alanında çizgisel renk (T) Test alanında çizgisel renk ile beraber oluşması durumunda Test Negatiftir.

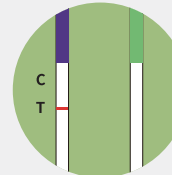

### Negatif Sonuç

Kontrol çizgisinin oluşmaması. Yetersiz miktarda test örneği veya doğru olmayan yöntemle yapılan ölçümlerde kontrol (C) çizgisi görünmez.